


# 視力マニュアル

2018.3.23作成 堀口

機材の準備をします

## ①本体の電源を入れる

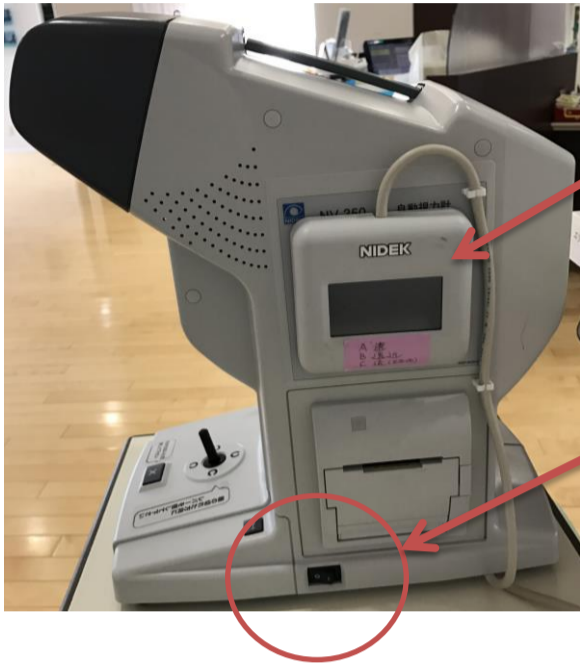


コンセントを差込みます

次に、操作盤が磁石で付いているので外して机に設置します

準備が出来たら電源ボタンをオンにして本体の電源を入れます

本体側面の下にある電源を入れる  
(結果用紙のフタの下にあります)

電源が入ると操作盤が右の写真のように表示されます

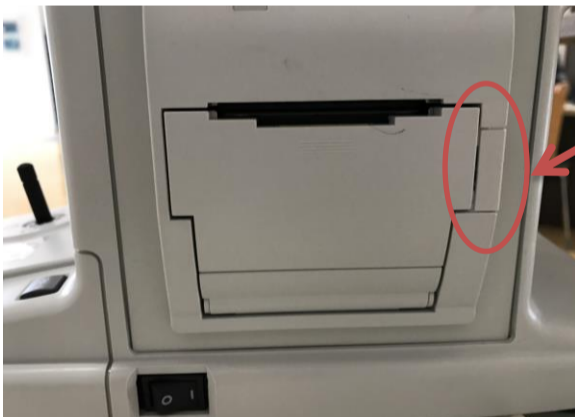

電源の上にある用紙入れのこの部分を押ししてフタをあけます

そうすると・・・

右の写真のような状態が入っています。



**\*設置が完了したら、実際に計測をしてみて動作確認を  
かならずしましょう！！！！\***

健診が始まったら

### ③バインダーを受け取り検査をします

検査前に必ず **裸眼** のいずれかを確認しましょう

- ・裸眼
- ・メガネ
- ・コンタクト

裸眼、または、矯正のどちらかを測定します。

もし、裸眼・矯正のどちらも計測したいと希望があれば両方計測します


### ④検査方法を設定し、検査を開始します



\*この時、操作画面は受診者様に見えないよう自分の方に向けておくこと！！

(検査時に穴のあいている方向が表示されてしまうので)

設定が **A** になっていることを確認してスタートボタンをおします

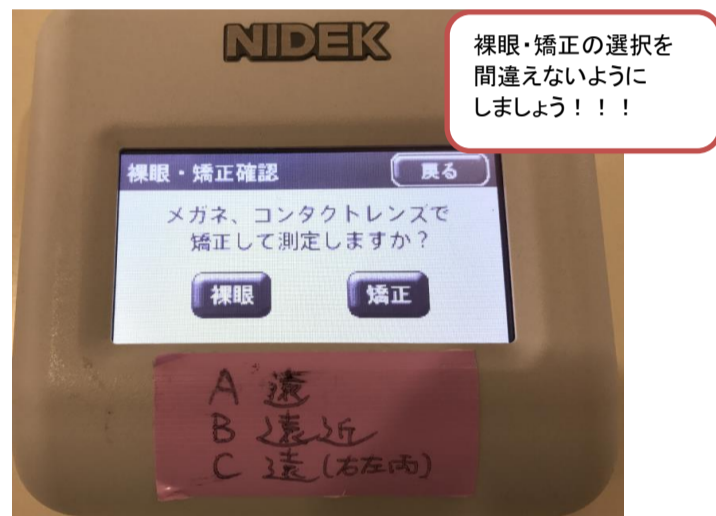

裸眼・矯正の選択画面が出てきます

#### 計測の仕方

- ・おでこをしっかりと本体につけます
- ・両目を開けた状態で計測します (機械が自動的に片側ずつ検査します)

検査が始まると画面の中に一部穴のあいた○が見えてきます

- ・あいている方向が分かったら同じ方向に本体下についているレバーを傾けます
- ・みえない時、わからない時はレバーの下にある **X** のボタンを押すと次の検査画面に移動して検査が続きます




分からない時  
みえない時は  
ここを押します

#### ★注意！！

レバーを使用して設定する際は


- ・レバーを手前に傾ける
  - ・裸眼なら→ **X** ボタン 矯正ならレバーを手前(下)に傾ける
- でも検査は開始できます

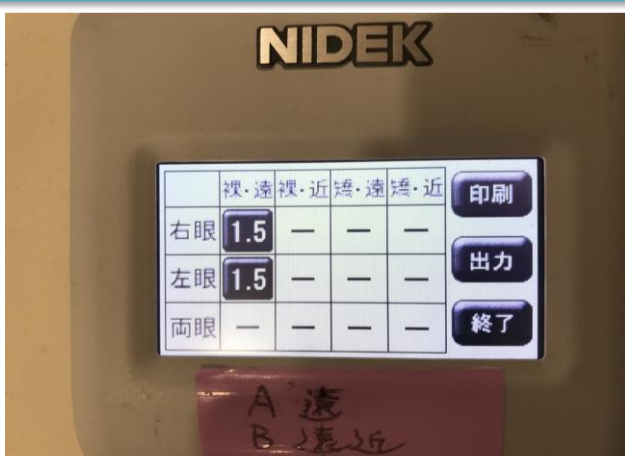

検査が終わると操作画面がこのように表示されて本体から結果用紙が出力されます。

### ⑤結果用紙に計測方法

(裸眼なら→ら メガネなら→メ コンタクトなら→コ)を記入します

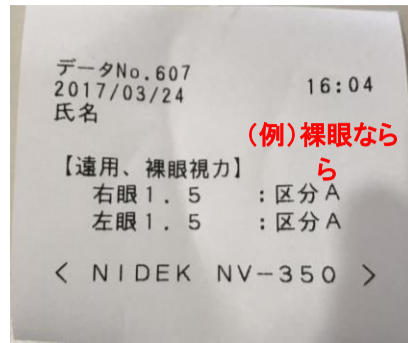

結果を確認する際は個人情報の問題もあるので大きな声で判定結果を確認するのはやめましょう。

確認するときは「こちらの結果になります。」などと聞きましょう。

### ⑥結果用紙をチェックリストに貼ります

受診日 2017/03/20 ID:00059256 女性 66歳 全国健康保険協会 千葉支部 (Cg01) 02回 (001) シトラヨコ 様		当日窓口精算額 項目チェック ロッカーNo. 止血チェック
・問診 ( ) ・胃部×線 ( ) ・血液検査 ( ) ・診察 ( ) ・血圧 ( ) ・身長体重 ( ) ・腹囲 ( ) ・視力 ( ) <b>印</b> [なし 眼鏡・コンタクト] ( ) ・聴力 ( ) ・心電図 ( ) ・胸部×線 ( )		保険証確認 其他の書類 すべて( )にチェックがされれば検査は終了です。 お着替後、ファイルと鍵を受付へご返却ください。
・採尿 ( ) ・便 1 ( ) ・便 2 ( )		

印鑑の捺印と検査方法に○を付けるのを忘れないように！

ここには身長体重の結果用紙が貼られます

視力 (印刷されてる) 裸眼...ら 矯正...メ(メガネの略)

肺機能検査がない時はここに貼る。

### ⑦検査のゴムを外してバインダーを返却します

\*バインダーを返す時に **紺色** のゴムを外してから返却します！！

以上で視力の検査は終了です