

# 聴カママニュアル



2018.3.23作成 堀口

検査前の準備をする

## ①本体(白色)とヘッドフォンを用意する



## ②本体にヘッドフォンと電源(グレー)の線を取り付ける

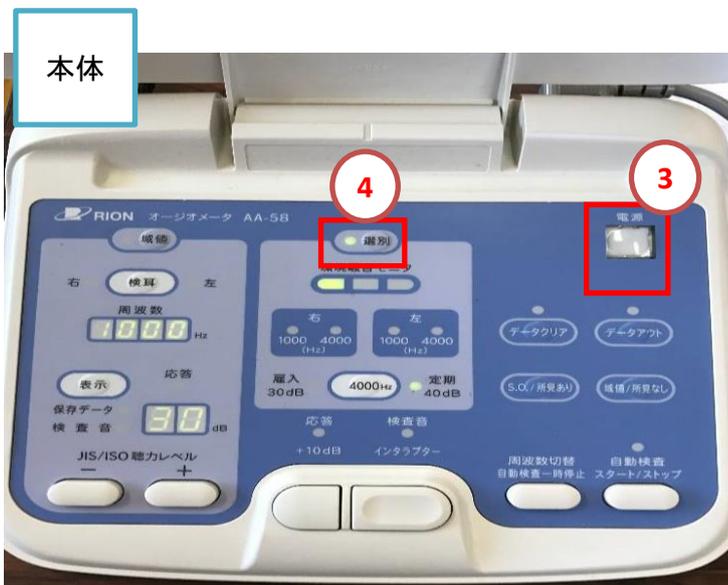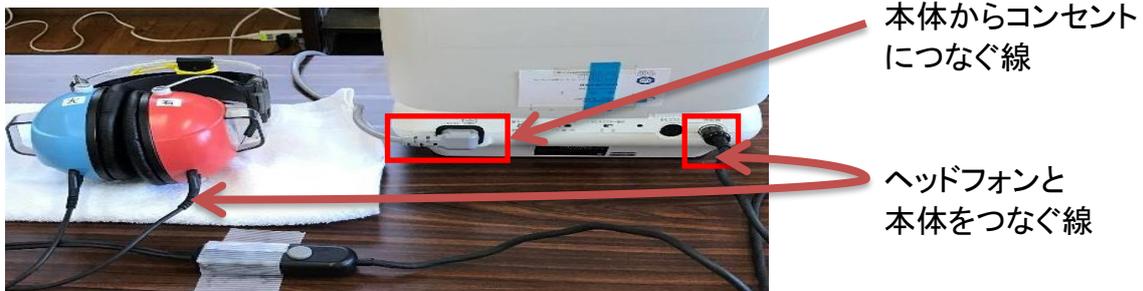

## ③本体の電源入れる

## ④選別を押す


\*ここまでで準備は完了です  
検査前に必ず自分で検査をして動作確認をしましょう

## 検査の手順

### ⑤ バイナリーを受け取り検査方法を説明する

「検査音は短い音がピー・ピー・ピーと左右それぞれ2種類ずつ聞こえてきます。聞こえている間はボタンを押し続けてください。聞こえない時はボタンから指を離してください」  
(人数が多い時には相手にわかりやすく、手短かに説明しましょう)

また、ヘッドフォンは**青→左** **赤→右** と決まっています。  
装着の際にご案内しましょう

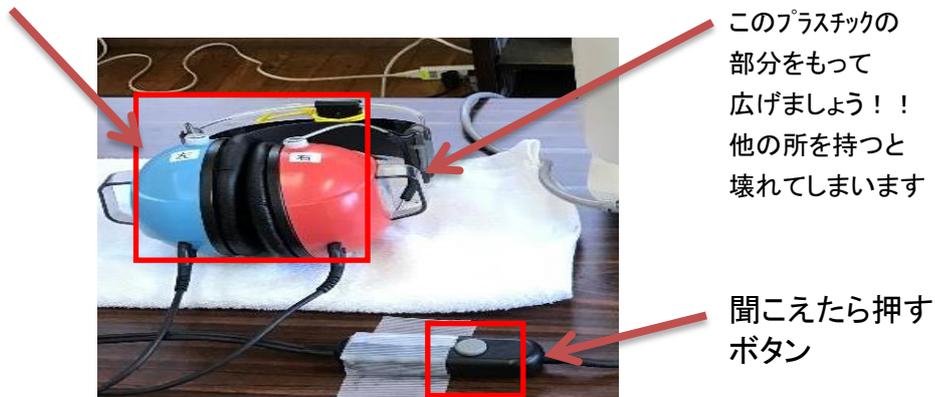

判定の結果を本人にもお伝えをしてチェックリストに結果を直接記入する

検査結果の確認の仕方は・・・  
正常なら・・・全て聞こえていますね



異常あり・右(又は左)の〇〇の音が聞き取りづらいですか？と確認しましょう。ただし、個人情報があるので声量には気をつけましょう！！

チェックリストの記入の仕方

**⑧聴力検査は用紙がないので直接チェックリストに結果を書きます**  
印鑑の捺印も忘れずにしましょう

その他、自動検査で行う方法もあります。

受診日 2017/03/20 ID:00059258 女性 66歳  
全国健康保険協会 千葉支部 (Cg01) 02回  
(001) ソウラ ヨコ 様

**チェックリストの書き方について**

全部聞こえてる場合「A」  
聞こえていない音がある場合は聞こえなかった方と音の高さを記載して×と書きます

- ・問診 ( ) ・胃部×線 ( )
- ・血液検査 ( ) ・保健指導 ( )
- ・診察 ( ) ・医師面接 ( )
- ・血圧 ( )
- ・身長体重 ( )
- ・腹囲 ( )
- ・視力 ( )  
[なし・眼鏡・コンタクト]
- ・聴力 ( **印** )
- ・心電図 ( )
- ・胸部×線 ( )

ここに書きましょう！！

(例)  
正常な場合  
**NP または A**  
右の低い音(30)が聞こえなかった場合  
**右30×**  
全部聞こえなかった場合  
**全て×**

**⑨バインダーから検査のゴムを外してお返します。**  
ゴムの色は **黄色** です

**★こんな時は…★**

**\*受診者様から「周りがうるさくて聞こえない」と言われた時**

特に検査開始直後は込み合っていて、周りがにぎやかなので「受診者様が多くいらっしゃるの、よろしければ他の検査が終わった後にお声かけていただければ再度検査をさせていただきますが、いかがいたしましょうか」とご案内してください。

受診者さんが希望されたらゴムは外さず、印鑑も捺印せずにバインダーをそのまま返却してください。

もし、捺印後に申し出があったら、捺印を二重線で消して、他の人が見ても未受診とわかるようにして返却してください。

**(ゴムは必ずつけた状態で返却すること！！)**