


# 血圧マニュアル

2018.3.23作成 堀口

本体の準備をする

## ①本体をコンセントにつなげる

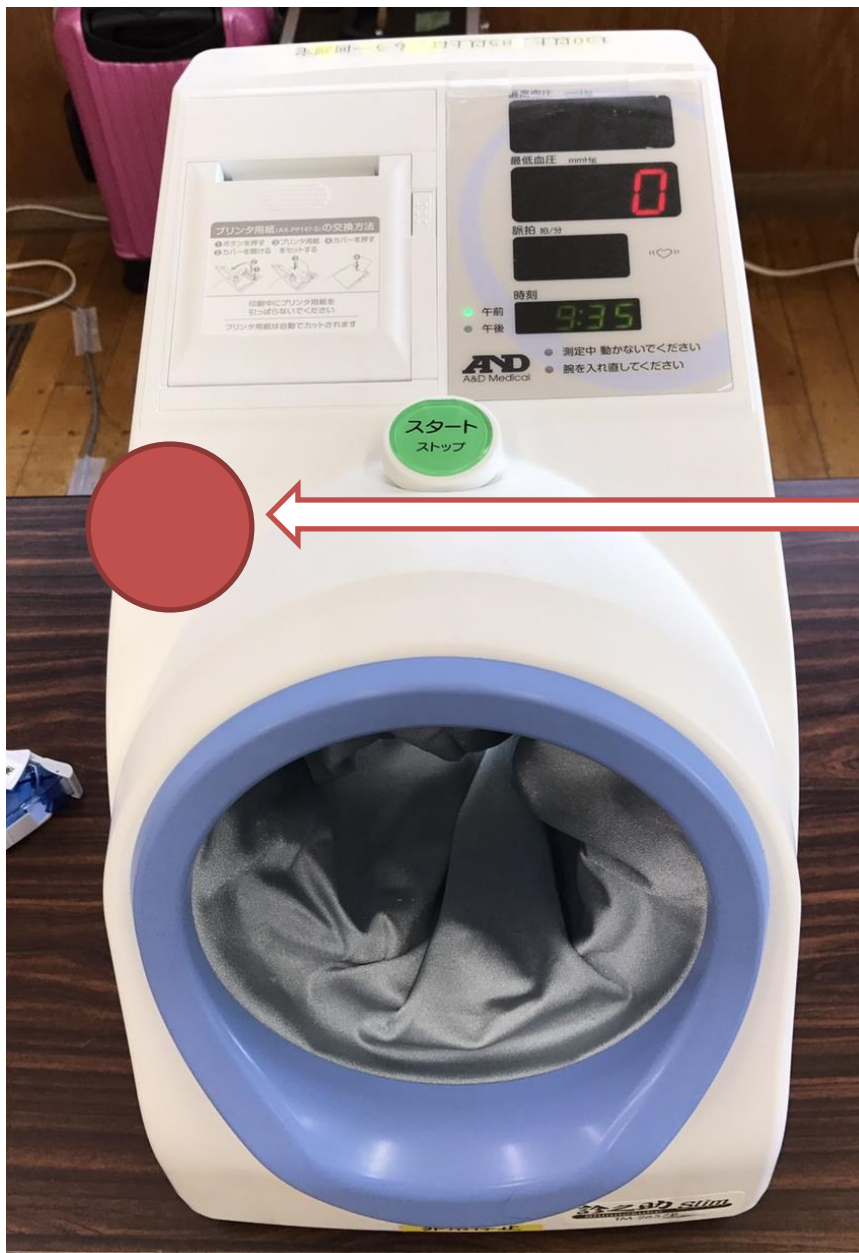


この裏側にコンセントがあります

↓裏側




コンセントを差し込む

## ②本体の電源入れる

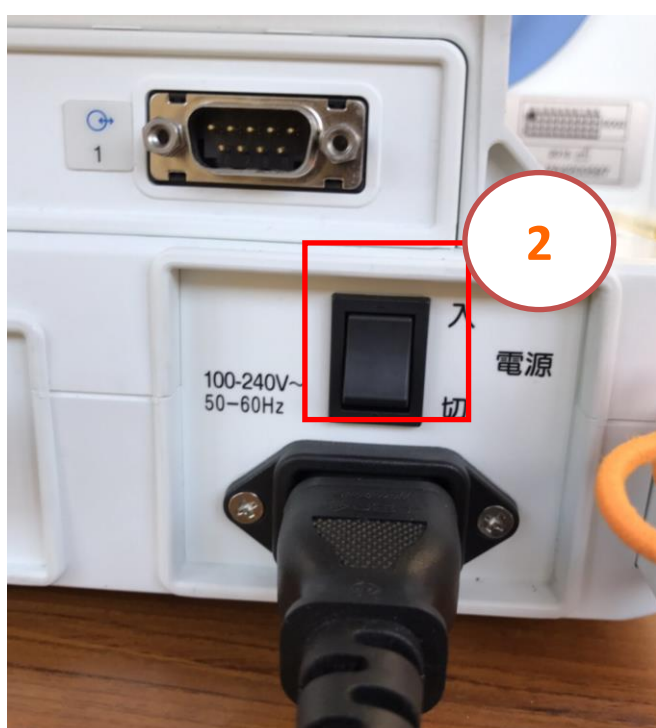

電源を **入** にする

### ③結果用紙の確認をする \*もし、少なくなっていたら交換しておく

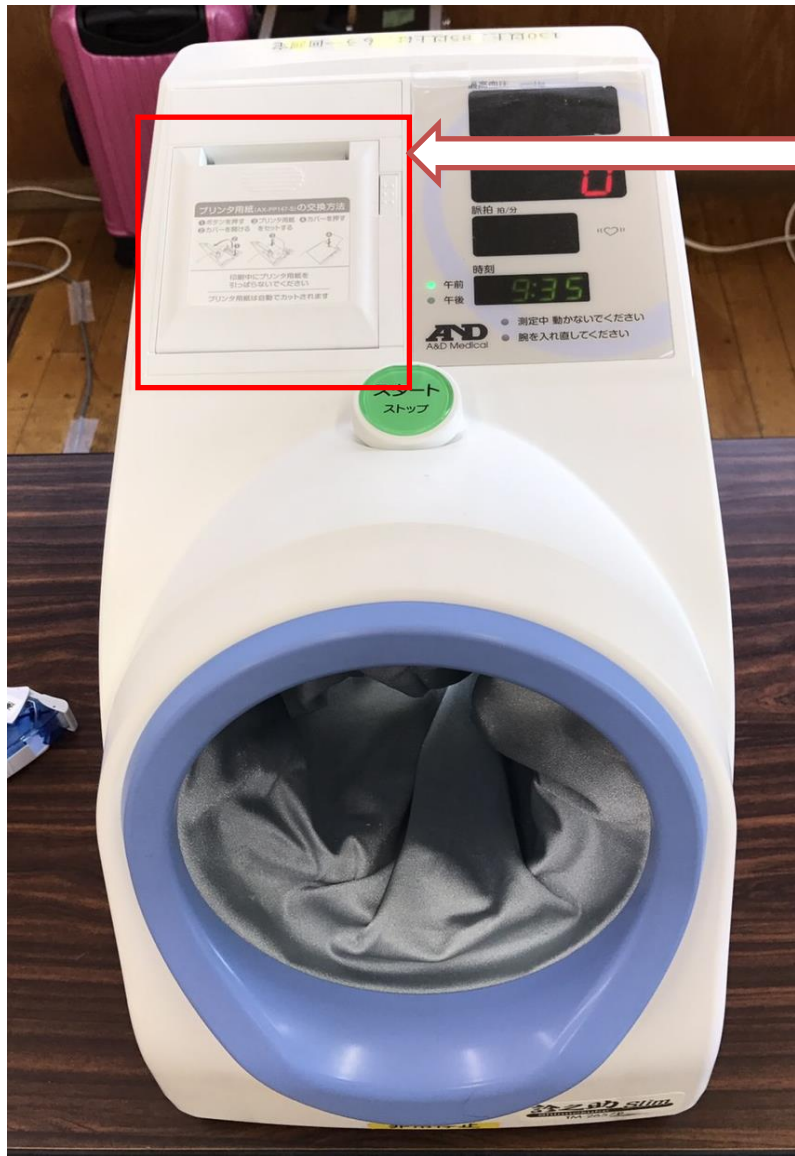

ふたは、押すと開くようになっています。開き方はふたに記載されていますので、読んでください。



ふたを開けるとこのように用紙が入っています。紙がなくなってくると両脇に赤い線が入ってきます。



用紙を交換する際には、このレバーを上を手動で変えてから交換します。

交換したら手動で元に戻します

ここを押すと紙が自動で送られます  
設定完了したらふたを閉じます

以上で準備は完了です。  
巡回健診が始まる前に必ず自分で血圧を測定してみて  
動作確認を行いましょう!!!

検査が始まったら

③バインダーを預かり、腕を入れてもらう

冬場など厚着の場合には上着など脱いでもらう




腕を入れると肘がくぼみに当たる部分があります

(基本どちらの腕でもOK。ただし、採血後の場合には採血していない方の腕で計測すること)

両腕を刺している、または採血した腕でどうしても計測したい場合は・・・

**時間を15分以上必ずあけて、止血の確認後に行いましょう**

④スタートボタンを押す

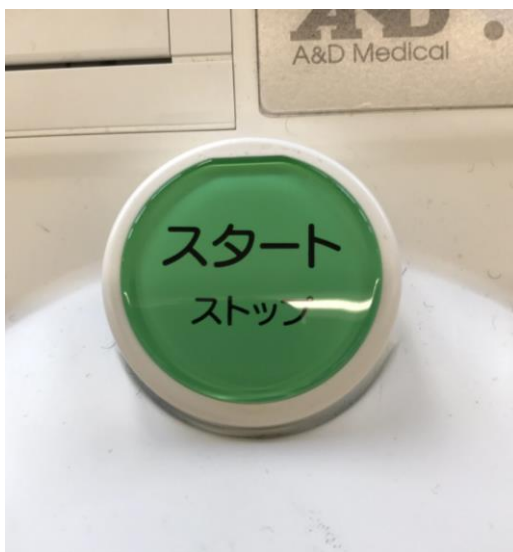

本体の真ん中にある緑色のスタートボタンを押して計測を開始します

計測中は腕や身体を動かさないようにします。

**\*もし腕が痛いなど緊急事態の際はもう一度緑のボタンを押すと計測が止まります**

⑤計測結果を確認します

結果を確認するときには、個人情報の問題もあるので、大きな声で言わないようにしましょう！！



**血圧の上 130 以上  
下 85 以上**


**どちらか当てはまる場合は 2回計測をすすめましょう。嫌がる方には無理強いしないでいいです。納得できていない方には3回目もすすめ**



⑦計測結果の用紙をチェックリストに貼ります  
用紙を貼ると同時に検査した項目に印鑑も捺印しましょう！！

受診日 2017/03/20 ID:00059256 女性 66歳 千葉県医師会 (Tk01) 02回 (001) シトラヨコ 様	<table border="1"> <tr> <td>当日窓口精算額</td> <td>項目チェック</td> <td>ロッカーNo.</td> <td>止血チェック</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>保険証確認</td> <td>受診券預り</td> <td>その他の書類</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	当日窓口精算額	項目チェック	ロッカーNo.	止血チェック					保険証確認	受診券預り	その他の書類			
当日窓口精算額	項目チェック	ロッカーNo.	止血チェック												
保険証確認	受診券預り	その他の書類													

・問診 ( )  
 ・血液検査 ( )  
 ・診察 ( )  
 ・**血圧** ( **印** ) **印鑑の捺印を忘れずに**  
 ・身長体重 ( )  
 ・腹囲 ( )  
 ・保健指導 ( )

画像用: 

・採尿 ( )

- 血圧貼る場所
- 血圧貼る場所  
2枚目(あれば)
- 血圧貼る場所  
3枚目(あれば)

⑧検査担当のゴムを外してバインダーを返しましょう

\*血圧の検査のゴムの色は **オレンジ色** です

以上で血圧の検査終了です。